

VITAgyn C[®] vaginalna krema s kislim pH

Vzdrževanje kislega nožničnega pH med 3,8 in 4,4 zavira rast mikroorganizmov, ki povzročajo bakterijsko vaginozo (bakterijsko vnetje nožnice). Kisel pH ustvari neugodno okolje za kolonizacijo bakterije *E. coli* in posledično ponavljajoče okužbe sečil. Kisel pH nožnice onemogoča virulentne dejavnike trihomonasa (*Trichomonas vaginalis*) in širjenje kandidate (*Candida albicans*) v nožnični sluznici.


Sestava: voda, cetil-steartilni alkohol, glicerin, olje sladkega mandlja, cetil-steartilni alkohol (20) OE, karitejevo maslo, natrijev poliakrilat, srebrov citrat, natrijev askorbilfosfat, tokoferil acetat, imidazolidinil urea, trietilcitrát / butil hidroksi toluen, silikonsko olje, butil paraben, izobutil paraben, izopropil paraben, maltodekstrini, natrijev hidrosulfid, dinatrijeva sol EDTA, mlečna kislina.

Indikacije: pomožno sredstvo pri zdravljenju in preprečevanju bakterijske vaginoze in ponavljajočih okužb sečil. Krema je zelo učinkovita pri ponavljajočih okužbah in po zdravljenju z antibiotiki. Vaginalna krema Vitagyn C obnavlja in ohranja naravni pH nožnice in pomaga pri razvoju naravne laktobakterijske flore. Na ta način preprečuje nastanek stanj, ki omogočajo razvoj bakterijske vaginoze. Primerna je tudi za uporabo med nosečnostjo.

Kontraindikacije: znana preobčutljivost na eno ali več sestavin medicinskega pripomočka.

Navodila za uporabo: pred uporabo pripomočka si skrbno umijte roke. Vaginalno kremo Vitagyn C nanesite v nožnico enkrat dnevno, najbolje zvečer pred spanjem, 6 zaporednih dni. Za vzdrževanje nanesite 1–2 nanosa tedensko, 12 tednov ali več. Vaginalna krema Vitagyn C je brez vonja, ne pušča oljnih madežev in ne umaže spodnjega perila.

- 1) **Odprite tubo in na njen vrat privijte aplikator za enkratno uporabo.**
- 2) **Tubo nežno stisnite, da krema v celoti napolni aplikator.**
- 3) **Aplikator odvijte s tube in ga čim globlje vstavite v nožnico. Za lažje uvajanje je priporočljivo, da pri tem ležite. S pritiskom na bat aplikator popolnoma izpraznite. Po uporabi istega aplikatorja ne uporabite ponovno, ampak ga zavržite.**

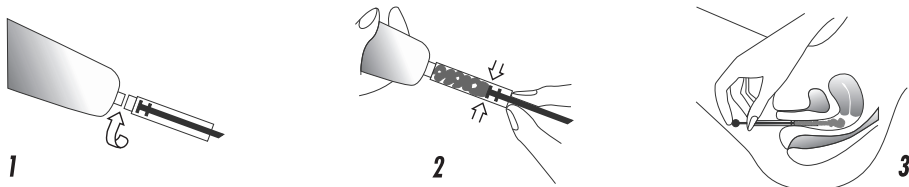

Opozorila: Dolgotrajna uporaba lahko povzroči preobčutljivost; v tem primeru prekinite terapijo in se posvetujte z zdravnikom. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi. Medicinskega pripomočka ne uporabljajte z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili brez predhodnega posveta z zdravnikom. Samo za osebno uporabo.

Pozor: Vaginalno kremo shranjujte tesno zaprto in jo zaščitite pred svetlobo in toploto. Ne uporabljajte je po izteku roka uporabe navedenem na embalaži, ali če je embalaža odprta oz. poškodovana.

Vsebina: aluminijasta tuba s 30g e in 6 aplikatorjev za enkratno uporabo C E 0434

MEDICINSKI PRIPOMOČEK C E 0373

 **Proizvajalec:**
FARMA-DERMA s.r.l. Via dei Bersaglieri, 10
40010 Sala Bolognese (BO) ITALIJA (ITALY)

Uvoznik:
DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11,
1370 Logatec - SLOVENIJA